



O componente protético Cilindro do Munhão Universal destina-se a procedimento especializado que deve ser realizado exclusivamente por profissionais habilitados. A escolha inadequada dos componentes protéticos, bem como o uso sem conhecimento dos procedimentos apropriados e/ou condições inadequadas, poderá causar resultados indesejáveis no procedimento protético.

INDICAÇÃO DE USO

O Cilindro Provisório é fabricado em polímero, indicado para confecção de próteses provisórias. Tem formato cilindro e em uma das extremidades possui encaixe para a instalação sobre o Munhão Universal. Possui no corpo retenções para realização da cimentação. Os Cilindros do Munhão Universal Provisório estão disponíveis em quatro medidas, conforme tabela abaixo, que devem ser utilizadas de acordo com a altura e o diâmetro do Munhão Universal selecionado. Modelos Munhão universal, universal master. universal anatômico e uma versão para base TI.

CILINDRO DO MUNHÃO UNIVERSAL	
Ø 3.3x4	Ø 3.3x6
Ø 4.5x4	Ø 4.5x6

CONTRA INDICAÇÕES

Contraindicado para espaço interoclusal insuficiente e posição tridimensional do Implante insatisfatória.

FORMAS DE APRESENTAÇÃO

Este produto é acondicionado em embalagem tipo envelope papel grau cirúrgico e embalagem secundária cartonada. Fornecido unitariamente. Estão na forma de "Não Estéril" com indicação de "Esterilizar antes do Uso".

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E DESCRIÇÕES DOS CILINDROS

Este produto é fabricado em poliacetal, não estéril e uso único. Fornecidos para técnica de dentes provisórios, para Munhões Universais:

Altura do Transmucoso: 4 e 6mm

Diâmetro: Ø3.3 e Ø4.5mm

MANUSEIO

A escolha do modelo de Cilindro a ser utilizado na prótese é definida de acordo com o Munhão Universal planejado pelo cirurgião dentista. Considerar o diâmetro definido e a altura cimentável do Munhão. Os Cilindros do Munhão Universal Provisório Master estarão fixados após um "clic". Em relação ao manuseio posicione o Cilindro Provisório sobre o Análogo no modelo de trabalho para acrilização indireta. Na acrilização direta o cilindro provisório deverá ser posicionado diretamente sobre o componente protético. A técnica de confecção indireta ainda pode passar pela etapa de enceramento antes da acrilização. Proteja o acesso do parafuso durante o processo de cimentação, se aplicável.

ESTERILIZAÇÃO

Os Cilindros do Munhão Universal são fornecidos "Não estéreis" deveram ser esterilizados por método de vapor úmido (autoclavagem), à temperatura de 120°C sob pressão de 1atm por 30 minutos, antes de sua inserção na cavidade bucal. A embalagem é recomendada para a esterilização em autoclave. A cadeia asséptica dos procedimentos deve ser observada durante toda a execução do caso. Recomenda-se seguir o método de esterilização por autoclave a vapor conforme os parâmetros e procedimentos estabelecidos na norma ABNT NBR 17665-1 Esterilização de Produtos para Saúde – Vapor, ou que se proceda conforme manual de instruções do fabricante do aparelho autoclave.

PRECAUÇÕES e ADVERTÊNCIAS

- Não utilizar o produto que apresente a embalagem danificada, violada.
- Deverá ser utilizado somente por profissionais adequadamente habilitados em implantodontia e/ou prótese.
- O uso do produto sem conhecimento das técnicas e/ou procedimentos e condições inadequadas, poderá gerar resultados não satisfatórios.
- Os Cilindros Provisórios são fornecidos não-estéreis e devem ser esterilizados antes da sua utilização. Produto "Proibido Reprocessar", é de uso único, o reuso pode ocasionar efeitos adversos decorrentes de resíduos de produtos, microrganismos e/ou substâncias decorrentes de usos anteriores e/ou do reprocessamento;
- O Cilindro Provisório deve ser utilizado em próteses paralelas, sem angulação. Devem ser realizados provas e testes de passividade e adaptação da prótese
- Proteja o acesso do parafuso durante o processo de cimentação, se aplicável.
- Não utilize o produto se sua validade estiver expirada.

ARMAZENAMENTO

Os Cilindros do Munhão Universal devem ser armazenados em ambiente limpo, seco, protegido da ação do sol.

TRANSPORTE

Os Cilindros do Munhão Universal devem ser armazenados em ambiente limpo, seco, protegido da ação do sol.

DESCARTE DE MATERIAIS

Todos os materiais de consumo utilizados na cirurgia poderão apresentar riscos à saúde de quem os manuseia. Antes de serem descartados ao meio ambiente, recomenda-se consultar e cumprir a legislação vigente.

PRAZO DE VALIDADE

O prazo de validade deste produto é indicado no rótulo.

SIMBOLOGIA

	validade		Mantenha afastado da luz solar		Código do lote		Número de catalogo
	Tamanho do produto		Consulte as instruções de Uso		Conserve seco		Não utilize se a embalagem estiver danificada
	Não Reutilize		Material de Fabricação do Produto		Fabricante		Quantidade
	Data de fabricação	PROIBIDO REPROCESSAR	Proibido Reprocessar	NON-STERILE 	Não Estéril		

REF 12MUP334; 12MUP336; 12MUP454; 12MU456; 12MUP334MA; 12MUP336MA; 12MUP454MA; 12MUP456MA; 12MUP334PF; 12MUP336PF; 12MUP454PF; 12MUP456PF; 12MUP405CR; 12MUP455CR; 12MUPAN; 12MUPANLT; 12BTICR; 12BTI3540; 12BTI3560; 12BTI4540; 12BTI4560; 12BTI5540; 12BTI5560; 12BTIHE33; 12BTIHE41; 12BTIHE50

Fabricante: WWM Peças Odonto Ltda.

Rua: José Rodrigues Pinheiro nº 2160 Bairro: Cidade Industrial Curitiba – PR CEP: 81170-200

CNPJ: 50.424.986/0001-03 SAC.: (41) 99685-3819

Responsável Técnico: Barbara de Lima Miranda CREA-PR: 216333/D

Registro Anvisa: 82960769005

Cilindro do Munhão Universal rev.00