



INSTRUÇÃO DE USO COMPONENTES PROTÉTICOS MUNHÃO

São destinados a procedimentos especializados que devem ser realizados exclusivamente por profissionais habilitados. Resultados indesejáveis poderão ocorrer com a escolha inadequada dos componentes odontológicos, bem como o uso sem conhecimento dos procedimentos e/ou condições inadequadas.

Componente Protético Munhão utilizado para confecção de próteses unitárias cimentadas, em procedimentos de reabilitação imediata ou convencional.

INDICAÇÃO DE USO

Componente protético intermediário para próteses fixas cimentadas. Os Munhões tem corpos cônicos com canais (aletas) para encaixe do transferente e travamento da prótese, duas áreas de cimentação. Os Munhões podem ser personalizados e possuem área para preparo no laboratório, modelos com facetado para travamento da prótese. Utilizado na confecção de próteses de elemento unitário. Disponíveis com parafuso (corpo duplo) ou peça única. Os modelos apresentam um hexágono interno no parafuso ou na peça única para auxiliar na aplicação de torque. Os munhões angulados possuem dois padrões de angulação 17° e 30° para correção de componentes mal instalados. Apresentado nos modelos Munhão, Munhão Personalizável e Munhão angulado. Interfaces protéticas compatíveis: Hexágono Externo (HE), Cone Morse (CM) Cone Morse Master, Cone Morse Narrow, Cone Morse short e Cone Morse WS. Área cimentável com Perfil de 4 e 6mm, para encaixe de Transferentes, ou área cimentável lisa para personalização. Diâmetros 3.3 a 5.0mm, com alturas entre 0.8 a 6.5mm.

CONTRA INDICAÇÕES

O Produto é contra indicado para pacientes que apresentam sinais de alergia ou hipersensibilidade aos componentes químicos do material: liga de titânio Ti6Al4V-ELI.

Não são esperados efeitos adversos desde que o produto seja utilizado de acordo com a sua instrução de uso.

FORMAS DE APRESENTAÇÃO

Disponíveis com parafuso (corpo duplo) ou peça única e acondicionado 01 unidade na embalagem; Embalagem Primária: Embalados em envelope 6.0x8.0mm, constituída de: filme laminado Poliéster/ Polipropileno e Papel Grau Cirúrgico. Rotulada. Estão na forma de "Não Estéril" com indicação de "Esterilizar antes do Uso" e "Proibido Reprocessar".

Embalagem Secundária: Cartela de Papel Cartonado.

Acompanha na embalagem três etiquetas que permite a sua rastreabilidade.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E DESCRIÇÕES DOS COMPONENTES PROTÉTICOS MUNHÕES:

Fabricados em Titânio ASTM F136, não estéril e de uso único. Fornecidos em diferentes modelos para atender as variações de conexões conforme a plataforma do Análogo/Implante (tab.1), e diferentes alturas para atender as variações necessárias para confecção da prótese cerâmica (tab.2).



Tab.01

	Componente Protético Munhão	Interface Análogos/Implantes					
		CM (11°)	CM Master (16°)	CM Short	CM WS (11°)	CM Master Narrow (16°)	HE
01	Munhão	OK	Ok	OK	OK	OK	OK
02	Munhão Angulado	OK	Ok	x	x	Ok	Ok
03	Munhão Personalizável	x	X	x	x	x	Ok

CM 11°/16°


CM Short, CM WS de 11° e CM Narrow 16°

HE 3.3/4.1/4.3/5.0

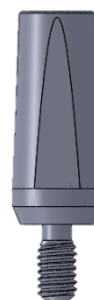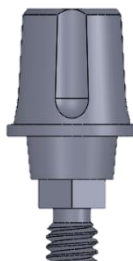



INSTRUÇÃO DE USO COMPONENTES PROTÉTICOS MUNHÃO

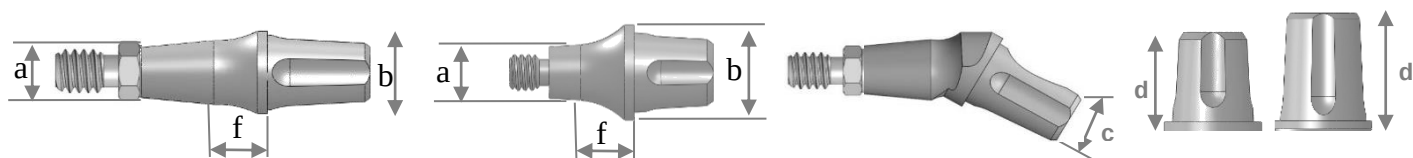

tab.2

	Interface Implante (a)	Ø Interface Prótese (b)				Ângulo (c)		Fixação Prótese Cimentada (d)			Altura do Transmucoso (f)										
		3.3	4.1	4.5	4.8	17°	30°	4.0	6.0	9.0	0.8	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	4.5	5.5	6.5
Munhão CM	11°30'	OK	x	OK	x	x	x	OK	OK	x	Ok	x	Ok	x	Ok	x	Ok	x	OK	OK	OK
Munhão CM Antirrotacional	Sext.2.0	OK	x	OK		x	x	OK	OK	x	Ok	x	Ok	x	Ok	x	Ok	x	OK	OK	OK
Munhão CM Master	16°	Ok	x	Ok	x	x	x	OK	OK	x	Ok	x	Ok	x	Ok	x	Ok	x	OK	OK	OK
Munhão Master Antirrotacional	Sext.2.0	OK	x	OK	x	x	x	OK	OK	x	Ok	x	Ok	x	Ok	x	Ok	x	OK	OK	OK
Munhão CM Short	30°	OK	x	OK	x	x	x	OK	OK	x	Ok	x	Ok	x	Ok	x	Ok	x	OK	x	x
Munhão CM WS	11°30'	OK	x	OK	x	Ok	Ok	OK	OK	x	Ok	x	Ok	x	Ok	x	Ok	x	x	x	x
Munhão CM Master Narrow	16°	OK	x	x	x	x	x	OK	OK	x	Ok	x	Ok	x	Ok	x	Ok	x	x	x	x
Munhão CM Angulado	11°30'	OK	x	OK	x	Ok	Ok	Ok	Ok	x	x	x	Ok	x	Ok	x	Ok	x	x	x	x
Munhão CM Angulado Antirrotacional	Sext.2.0	OK	x	OK	x	Ok	Ok	OK	Ok	x	x	x	Ok	x	Ok	x	Ok	x	x	x	x
Munhão CM Master Angulado	16°	OK	x	OK	x	Ok	Ok	OK	OK	x	x	x	Ok	x	Ok	x	Ok	x	x	x	x
Munhão CM Master Angulado Antirrotacional	Sext.2.0	OK	x	OK	x	Ok	Ok	OK	OK	x	x	x	Ok	x	Ok	x	Ok	x	x	x	x
Munhão CM Master Narrow Angulado	16°	OK	x	x	x	Ok	Ok	OK	OK	x	x	x	Ok	x	Ok	x	Ok	x	x	x	x
Munhão Personalizável HE	Sextavado	OK	Ok	x	Ok	x	x	x	x	OK	x	Ok	x	Ok	x	Ok	x	x	x	x	x
Munhão HE	Sext.4.1	x	x	OK	x	x	x	OK	OK	x	x	Ok	x	Ok	x	Ok	x	Ok	x	x	x
Munhão HE Angulado	Sextavado	OK	Ok	x	Ok	Ok	Ok	x	x	Ok	x	x	x	Ok	x	Ok	x	Ok	x	x	x

Unidade (mm)

MANUSEIO

-Selecionar o Componente Provisório Munhão de acordo com a conexão (interface) do análogo / implante e as dimensões tab.1 e 2. A não realização da avaliação pode comprometer o sucesso do procedimento. Os modelos podem ser utilizados, na fundição, cimentação e personalização da estrutura da prótese cerâmica no laboratório protético.

-Após confecção da prótese dentária o torque de instalação e o instrumento utilizado para realizar o mesmo está indicado na tab.03

-São comercializados de forma Não Estéril. Esterilizar em autoclave. A embalagem é recomendada para a esterilização em autoclave.

Tab.03

	Componentes Protéticos Munhão	Instrumental (mm)		
		Sextavado 1.2	Quadrado 1.3	Torque N.cm
01	Munhão CM	Ok	X	32 N.cm
02	Munhão CM Master	OK	X	20 N.cm
03	Munhão CM Short	OK	X	20 N.cm
04	Munhão CM WS	OK	X	20 N.cm
05	Munhão CM Master Narrow	OK	X	20 N.cm
06	Munhão HE	OK	OK	32 N.cm

ESTERILIZAÇÃO

O Componente Protético Munhão deverá ser esterilizado por método de vapor úmido (autoclavagem), à temperatura de 120°C sob pressão de 1atm por 30 minutos, antes de sua inserção na cavidade bucal. A embalagem é recomendada para a esterilização em autoclave. A cadeia asséptica dos procedimentos deve ser observada durante toda a execução do caso. Recomenda-se seguir o método de esterilização por autoclave a vapor conforme os parâmetros e procedimentos estabelecidos na norma ABNT NBR 17665-1 Esterilização de Produtos para Saúde – Vapor, ou que se proceda conforme manual de instruções do fabricante do aparelho autoclave.

PRECAUÇÕES e ADVERTÊNCIAS

-Deverá ser utilizado somente por profissionais adequadamente habilitados em laboratório protético ou implantodontia.

-Produto não estéril. Esterilizar antes do uso. A prótese final deve ser esterilizada antes da instalação em boca.

-Não utilizar o produto que apresente a embalagem violada.



INSTRUÇÃO DE USO COMPONENTES PROTÉTICOS MUNHÃO

- Produto de uso único. Proibido Reprocessar. O Componente Protético Munhão, é de uso único, o reuso pode ocasionar efeitos adversos decorrentes de resíduos de produtos, microrganismos e/ou substâncias decorrentes de usos anteriores e/ou do reprocessamento;
- Assegurar que o produto não seja engolido ou aspirado pelo paciente.
- Torque de inserção superior ao recomendado, e instrumentais inadequados podem causar danos ao produto.
- Certifique-se que o mesmo possui a mesma interface protética do análogo/implante.
- Não utilize o produto se sua validade estiver expirada.

ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE

Os Componentes Protéticos Munhões devem ser armazenados em ambiente limpo, seco, protegido da ação do sol.

DESCARTE DE MATERIAIS

Todos os materiais de consumo utilizados no procedimento odontológico poderão apresentar riscos à saúde de quem os manuseia. Antes de serem descartados ao meio ambiente, recomenda-se consultar e cumprir a legislação vigente.

PRAZO DE VALIDADE

O prazo de validade deste produto é indicado no rotulo.

SIMBOLOGIA

	validade		Mantenha afastado da luz solar		Código do lote		Número de catalogo
	Tamanho do produto		Consulte as instruções de Uso		Conserve seco		Não utilize se a embalagem estiver danificada
	Não Reutilize		Material de Fabricação do Produto		Fabricante		Quantidade
	Data de fabricação	PROIBIDO REPROCESSAR	Proibido Reprocessar		Não Estéril		

REF 07CM33408; 07CM33415; 07CM33425; 07CM33435; 07CM33445; 07CM33455; 07CM33465; 07CM33608; 07CM33615; 07CM33625; 07CM33635; 07CM33645; 07CM33655; 07CM33665; 07CM33408AR; 07CM33415AR; 07CM33425AR; 07CM33435AR; 07CM33445AR; 07CM33455AR; 07CM33465AR; 07CM33608AR; 07CM33615AR; 07CM33625AR; 07CM33635AR; 07CM33645AR; 07CM33655AR; 07CM33665AR; 07CM45408; 07CM45415; 07CM45425; 07CM45435; 07CM45445; 07CM45455; 07CM45465; 07CM45608; 07CM45615; 07CM45625; 07CM45635; 07CM45645; 07CM45655; 07CM45665; 07CM45608AR; 07CM45615AR; 07CM45625AR; 07CM45635AR; 07CM45645AR; 07CM45655AR; 07CM45665AR; 07CM1733415; 07CM1733425; 07CM1733435; 07CM1733615; 07CM1733625; 07CM1733635; 07CM3033415; 07CM3033425; 07CM3033435; 07CM3033615; 07CM3033625; 07CM3033635; 07CM1733415AR; 07CM1733425AR; 07CM1733435AR; 07CM1733615AR; 07CM1733625AR; 07CM1733635AR; 07CM3033415AR; 07CM3033425AR; 07CM3033435AR; 07CM3033615AR; 07CM3033625AR; 07CM3033635AR; 07CM1745415; 07CM1745425; 07CM1745435; 07CM1745615; 07CM1745625; 07CM1745635; 07CM3045415; 07CM3045425; 07CM3045435; 07CM3045615; 07CM3045625; 07CM3045635; 07CM1745415AR; 07CM1745425AR; 07CM1745435AR; 07CM1745615AR; 07CM1745625AR; 07CM1745635AR; 07CM3045415AR; 07CM3045425AR; 07CM3045435AR; 07CM3045615AR; 07CM3045625AR; 07CM3045635AR; 07CMM33408; 07CMM33415; 07CMM33425; 07CMM33435; 07CMM33445; 07CMM33455; 07CMM33465; 07CMM33608; 07CMM33615; 07CMM33625; 07CMM33635; 07CMM33645; 07CMM33655; 07CMM33665; 07CMM45408; 07CMM45415; 07CMM45425; 07CMM45435; 07CMM33445; 07CMM45455; 07CMM45465; 07CMM45608; 07CMM45615; 07CMM45625; 07CMM45635; 07CMM45645; 07CMM45655; 07CMM45665; 07CMM1733415; 07CMM1733425; 07CMM1733435; 07CMM1733615; 07CMM1733625; 07CMM1733635; 07CMM3033415; 07CMM3033425; 07CMM3033435; 07CMM3033615; 07CMM3033625; 07CMM3033635; 07CMM1733415AR; 07CMM1733425AR; 07CMM1733435AR; 07CMM1733615AR; 07CMM1733625AR; 07CMM1733635AR; 07CMM3033415AR; 07CMM3033425AR; 07CMM3033435AR; 07CMM3033615AR; 07CMM3033625AR; 07CMM3033635AR; 07CMM1745415; 07CMM1745425; 07CMM1745435; 07CMM1745615; 07CMM1745625; 07CMM1745635; 07CMM3045415; 07CMM3045425; 07CMM3045435; 07CMM3045615; 07CMM3045625; 07CMM3045635; 07CMM1745415AR; 07CMM1745425AR; 07CMM1745435AR; 07CMM1745615AR; 07CMM1745625AR; 07CMM1745635AR; 07CMM3045415AR; 07CMM3045425AR; 07CMM3045435AR; 07CMM3045615AR; 07CMM3045625AR; 07CMM3045635AR; 07CMN408; 07CMN415; 07CMN425; 07CMN435; 07CMN608; 07CMN615; 07CMN625; 07CMN635; 07CMN17415; 07CMN17425; 07CMN17435; 07CMN17615; 07CMN17625; 07CMN17635; 07CMST408; 07CMST415; 07CMST425; 07CMST435; 07CMST445; 07CMST608; 07CMST615; 07CMST625; 07CMST635; 07CMST645; 07CMWS408; 07CMWS415; 07CMWS425; 07CMWS435; 07CMWS608; 07CMWS615; 07CMWS625; 07CMWS635; 07HE3301; 07HE3302; 07HE3303; 07HE4101; 07HE4102; 07HE4103; 07HE4301; 07HE4302; 07HE4303;



INSTRUÇÃO DE USO
COMPONENTES PROTÉTICOS MUNHÃO

07HE5001; 07HE5002; 07HE5003; 07HE4541; 07HE4542; 07HE4543; 07HE4544; 07HE4561; 07HE4562; 07HE4563;
07HE4564; 07HE33172; 07HE33173; 07HE33174; 07HE33303; 07HE33304; 07HE41172; 07HE41173; 07HE41174;
07HE41303; 07HE41304; 07HE43172; 07HE43173; 07HE43174; 07HE43303; 07HE43304; 07HE50172; 07HE50173;
07HE50174; 07HE50303; 07HE50304

Fabricante: WWM Peças Odonto Ltda.

Rua: José Rodrigues Pinheiro nº 2160 Bairro: Cidade Industrial Curitiba – PR CEP: 81170-200

CNPJ: 50.424.986/0001-03 SAC.: (41) 99685-3819

Responsável Técnico: Barbara de Lima Miranda CREA-PR: 216333/D

Registro Anvisa: 82960769007

Instrução de Uso: Componentes Protéticos Munhões rev.00