



INSTRUÇÃO DE USO TRANSFER DO MUNHÃO UNIVERSAL

O componente protético Transfer do Munhão Universal destina-se a procedimento especializado que deve ser realizado exclusivamente por profissionais habilitados. A escolha inadequada dos componentes protéticos, bem como o uso sem conhecimento dos procedimentos apropriados e/ou condições inadequadas, poderá causar resultados indesejáveis no procedimento protético.

INDICAÇÃO DE USO

Transfer é um Componente Protético fabricado em polímero com função específica de transferência (moldagem) sobre o Munhão Universal. É indicado para técnica de moldeira fechada. Os Transfers do Munhão Universal estão disponíveis em quatro medidas, conforme tabela abaixo, que devem ser utilizadas de acordo com a altura e o diâmetro do Munhão Universal selecionado.

TRANSFER DO MUNHÃO UNIVERSAL	
Ø 3.3x4	Ø 3.3x6
Ø 4.5x4	Ø 4.5x6

CONTRA INDICAÇÕES

Deve-se estar atento em casos de pacientes que apresentem sinais de alergia ou hipersensibilidade aos componentes químicos do material: polímero. Contraindicado para espaço interoclusal insuficiente e posição tridimensional do Implante insatisfatória.

REAÇÕES ADVERSAS

Não ocorrem efeitos adversos, desde que as indicações destes produtos sejam respeitadas.

FORMAS DE APRESENTAÇÃO

Disponíveis EM peça única e acondicionado 01 unidade na embalagem;
Embalagem Primária: Embalados em envelope 6.0x8.0mm, constituída de: filme laminado Poliéster/Polipropileno e Papel Grau Cirúrgico. Rotulada. Estão na forma de "Não Estéril" com indicação de "Esterilizar antes do Uso" e "Proibido Reprocessar".
Embalagem Secundária: Cartela de Papel Cartonado.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E DESCRIÇÕES DOS TRANSFER

Este produto é fabricado em poliacetal, não estéril e uso único. Fornecidos na técnica de Moldeira Fechada, para Munhões Universais:

Altura do Transmucoso: 4 e 6mm

Diâmetro: Ø3.3 e Ø4.5mm

MANUSEIO

Para o procedimento de moldagem, encaixe o Transfer do Munhão Universal correspondente, certifique-se do encaixe através de um "clique" e realize a moldagem com a técnica fechada utilizando materiais adequados. Retire o molde com o Transfer do Munhão Universal e encaixe o Análogo do Munhão Universal sobre o Transfer do Munhão Universal. Confeccione o modelo gesso.

ESTERILIZAÇÃO

Os Transfers do Munhão Universal são fornecidos "Não estéreis" deveram ser esterilizados por método de vapor úmido (autoclavagem), à temperatura de 120°C sob pressão de 1atm por 30 minutos, antes de sua inserção na cavidade bucal. A embalagem é recomendada para a esterilização em autoclave. A cadeia asséptica dos procedimentos deve ser observada durante toda a execução do caso. Recomenda-se seguir o método de esterilização por autoclave a vapor conforme os parâmetros e procedimentos estabelecidos na norma ABNT NBR 17665-1 Esterilização de Produtos para Saúde – Vapor, ou que se proceda conforme manual de instruções do fabricante do aparelho autoclave.

PRECAUÇÕES e ADVERTÊNCIAS

Não utilizar o produto que apresente a embalagem danificada, violada.

Deverá ser utilizado somente por profissionais adequadamente habilitados em implantodontia e/ou prótese.

O uso do produto sem conhecimento das técnicas e/ou procedimentos e condições inadequadas, poderá gerar resultados não satisfatórios.

Não ocorrem efeitos adversos, desde que as indicações destes produtos sejam respeitadas.

Os Transfers são fornecidos não-estéreis e devem ser esterilizados antes da sua utilização. Produto "Proibido Reprocessar", se aberto da embalagem, esterilizar e não utiliza-lo no procedimento deve ser descartado.

ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE

Os Transfers do Munhão Universal devem ser armazenados em ambiente limpo, seco, protegido da ação do sol.

DESCARTE DE MATERIAIS

Todos os materiais de consumo utilizados no procedimento odontológico poderão apresentar riscos à saúde de quem os manuseia. Antes de serem descartados ao meio ambiente, recomenda-se consultar e cumprir a legislação vigente.



INSTRUÇÃO DE USO
TRANSFER DO MUNHÃO UNIVERSAL

PRAZO DE VALIDADE

O prazo de validade deste produto é indicado no rótulo.

SIMBOLOGIA

	validade		Mantenha afastado da luz solar		Código do lote		Número de catalogo
	Tamanho do produto		Consulte as instruções de Uso		Conserve seco		Não utilize se a embalagem estiver danificada
	Não Reutilize		Material de Fabricação do Produto		Fabricante		Quantidade
	Data de fabricação	PROIBIDO REPROCESSAR	Proibido Reprocessar	NON-STERILE 	Não Estéril		

14MU334; 14MU336; 14MU454; 14MU456; 14MU334PF; 14MU336PF; 14MU454PF; 14MU456PF; 14MUM334; 14MUM336; 14MUM454; 14MUM456; 14MUP405CR; 14MUP455CR; 14CPMUI.

Fabricante: WWM Peças Odonto Ltda.

Rua: José Rodrigues Pinheiro nº 2160 Bairro: Cidade Industrial Curitiba – PR CEP: 81170-200

CNPJ: 50.424.986/0001-03 SAC.: (41) 99685-3819

Responsável Técnico: Barbara de Lima Miranda CREA-PR: 216333/D

Registro Anvisa: 82960760001

Instrução de Uso: Transfer do Munhão Universal rev.00